





Rekommendation inhalationskammare

Aerochamber Plus Flow-Vu, L'espace, Optichamber Diamond och Vortex passar samtliga rekommenderade inhalationssprayer i REK-listan.

De är alla antistatiska men varierar i storlek, material, masker samt ventiler.

Synliga ventiler möjliggör räkning av andetag och kontroll av att patienten inhalerar på ett korrekt sätt. Olikheter mellan inhalationskammare innebär en viss skillnad i användarvänlighet. Troligen är det ingen skillnad i klinisk effekt om de används rätt.

Samtliga rekommenderade inhalationskammare har en hållbarhet på 12 månader.

<p>Optichamber Diamond</p>	<p>Förstahandsval Användning i hemmet</p>		<p>Synlig utandningsventil Tjuter vid för kraftig inandning Handdiskas med diskmedel Mask förskrivs separat</p>
<p>Vortex</p>	<p>Förstahandsval Användning på vårdinrättning</p>		<p>Inte lika tydlig utandningsventil Kokbar. Autoklaverbar (gäller ej mask) Mask förskrivs separat</p>
<p>Aerochamber Plus Flow-Vu</p>	<p>Andrahandsval Användning i hemmet</p>		<p>Synlig in- och utandningsventil Tjuter vid för kraftig inandning Tål diskmaskin (<70 grader) Mask eller munstycke inkluderad</p>
<p>L'espace</p>	<p>Andrahandsval Användning på vårdinrättning</p>		<p>Synlig utandningsventil Kokbar. Autoklaverbar Mask eller munstycke inkluderad</p>